

sigvaris

Coton CHAUSSETTES BAS AUTO-FIXANTS COLLANT

CLASSE

2

XX€

Produit à base de coton naturellement respirant, favorise l'évacuation de l'humidité grâce à la présence de coton.






D'autres visuels sont disponibles dans le dossier photos.

« On a tous envie de se sentir fort, débordant de vitalité et libre de mener sa vie pleinement ».

Chez Sigvaris nous avons développé des produits de compression uniques qui vont bien au-delà du traitement purement médical. Bien sûr ils sont confortables mais cela ne suffit pas. Ils sont aussi faciles à vivre au quotidien.

Notre large choix de solutions spécialement adaptées à chacune de vos attentes et leur design soigné vous donneront envie de les porter. Avec plus de 150 ans d'expertise médicale et un savoir-faire de qualité, vous bénéficiez du meilleur de la compression.

Pour que vous continuiez à mener votre vie pleinement. Pour que vous vous sentiez vous-même.

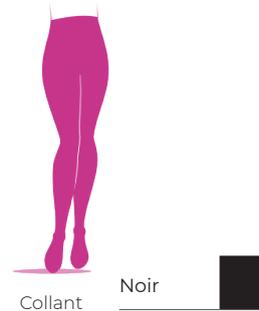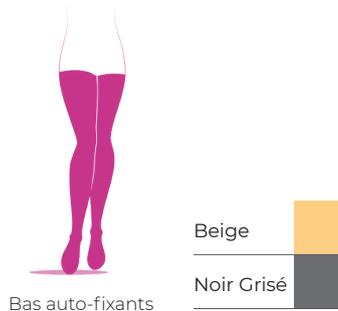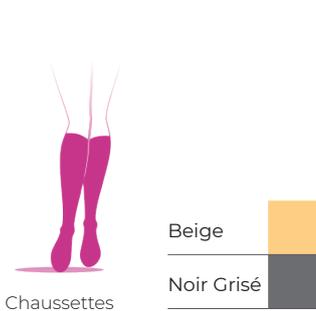

MESURES ET TAILLAGES

Taille, Hauteur en cm

Taille	Cheville B	Mollet C	Cuisse B.A.F. M	Cuisse Collant M	Hanches
S	19 - 22	32 - 36	45 - 51	45 - 58	≤ 105
M	22 - 24	35 - 39	48 - 54	48 - 61	≤ 115
L	24 - 26	38 - 42	51 - 57	51 - 65	≤ 125
XL	26 - 29	41 - 45	54 - 60	54 - 68	≤ 125

Hauteur	1/2 jambe A - D	jambe A - C	Pointure
Normal	≤ 40	≤ 75	36/40
Long	≥ 40	≥ 75	37/41



La compression, comment ça marche ?

La compression médicale est un traitement⁽¹⁾ dont l'objectif est de favoriser le retour du sang vers le cœur⁽²⁾. Son principe est simple : appliquer un textile élastique exerçant une pression active le long de la jambe⁽³⁾.

POUR ENTREtenir VOTRE PRODUIT



Lavez en machine, programme délicat à 30°C.



N'utilisez pas d'assouplissant.



Séchez loin de toute source de chaleur.

Pour prolonger la vie de vos produits, utilisez un filet de lavage.

COMPOSITION

Polyamide - Coton - Élasthanne

TAGS

chaussettes, bas auto-fixants, collants, retour veineux, jambes, contention, compression, Sigvaris.

⁽¹⁾ Les chaussettes, bas et collant de compression sont considérés comme des dispositifs médicaux et non des médicaments. ⁽²⁾ Société Française de Phlébologie. Dossier de presse : séminaire d'information de prévention des maladies veineuses. Avril 2008. ⁽³⁾ HAS. Dispositifs de compression médicale à usage individuel. Utilisation en pathologie vasculaire (révision de la liste des produits et prestations remboursables). Septembre 2010. Les produits de compression sont des dispositifs médicaux (règlement 2017/745) fabriqués par SIGVARIS. Ils sont destinés au traitement de base des maladies veineuses et lymphatiques⁽⁴⁾. Pour le bon usage, il convient d'enfiler les produits dès le réveil et au lever, sur une peau propre et sèche. Ne pas utiliser les produits sur une peau lésée. Les conditions et les durées de port des produits de compression médicale sont à demander à votre prescripteur. Ce dispositif est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lisez attentivement la notice d'utilisation. Demandez conseil à votre professionnel de santé. Juin 2019. © Copyright by SIGVARIS, Saint-Just Saint-Rambert. Sigvaris and its products are registered trademarks of SIGVARIS, St Gallen/Switzerland, in many countries worldwide. ⁽⁴⁾ HAS. Dispositifs de compression médicale à usage individuel - Utilisation en pathologies vasculaires. Septembre 2010.